

**E▶Eye**

**PROTOCOLE**  
de stimulation  
des glandes de  
Meibomius



**E▶Swin**

PREMIER FABRICANT FRANÇAIS DE HAUTES TECHNOLOGIES DE LUMIÈRE

## LE PROTOCOLE DE TRAITEMENT AVEC L'E>Eye

### AVANT LA SÉANCE :


- Expliquer la technologie et le principe de la stimulation des glandes de Meibomius au patient.
- Rechercher une éventuelle contre-indication à la lumière pulsée.
- Le renseigner sur les tarifs d'une séance et autres forfaits.
- Lui faire lire attentivement le consentement éclairé ①.
- Lui faire compléter et signer ce consentement éclairé ②.
- Lui demander de venir à la séance sans produit cosmétique sur la peau.

### AU MOMENT DE LA SÉANCE :

- S'assurer que le patient n'a aucune contre-indication (notamment pas de traitement en cours).
- S'assurer de l'absence de produit cosmétique sur la peau qu'il convient de retirer le cas échéant avec une solution micellaire sans parfum ③.
- Masquer les éventuels grains de beauté et autres taches brunes à l'aide des **patches**.
- Installer sur votre patient les **eye mask** de protection et vérifier leur bon positionnement ④.
- **Appliquer le gel en quantité importante (minimum 1 cm d'épaisseur) en veillant à ce qu'il ne pénètre pas sous les eye mask** ⑤.
- Régler la puissance au fur et à mesure des séances en fonction du ressenti du patient et des résultats obtenus ⑥.
- Déverrouiller les sécurités ⑦.
- Mettre vos lunettes de protection **mask** ⑧.
- Réaliser 5 flashs sur l'hémi-visage gauche ⑨, en partant du canthus interne de l'œil et en finissant sur la zone temporale ⑩.
- Répéter l'opération sur l'hémi-visage droit ⑪.
- Arrêter la machine en fin de séance.
- Retirer le **gel** et rincez la peau ⑫.

### APRÈS LA SÉANCE :

- Prévenir le patient des rougeurs qui peuvent apparaître.
- Imposer au patient de ne pas effectuer d'autres interventions sur les zones flashées durant l'ensemble du cycle des séances.
- Prévoir la deuxième séance deux semaines plus tard (J0+15), puis les autres séances à J0+45 (J0+75 optionnel).
- Recommander l'utilisation d'une protection solaire au niveau des zones flashées en cas d'exposition intense aux UV.

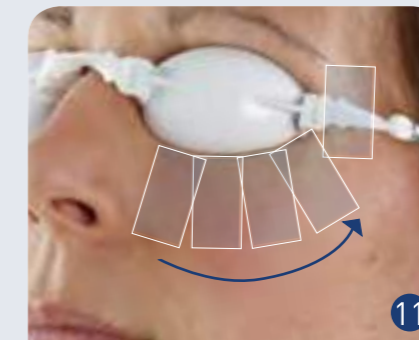

# E-EYE : une innovation française



**Pour plus informations sur l'E-EYE rendez-vous sur :**

[www.e-swin-vision.com](http://www.e-swin-vision.com)

**Contactez-nous par téléphone :**

+33 1 30 46 37 68

**ou par email :**

[commercial@e-swin-pro.com](mailto:commercial@e-swin-pro.com)

Ref. : M029FR002A08A

L'E-EYE, conçu et fabriqué par E-Swin (France), est un dispositif de santé réglementé de classe IIb, portant le marquage CE (délivré par l'organisme CE 0499). Il traite la blépharite Méibomiéenne. Respecter les conditions d'utilisation de la notice.

